



Applix Smart - Oppdateringer mai 2009

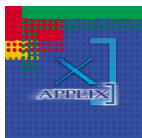

Ny dør

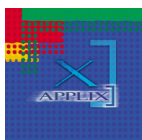

Ny software



**FRESENIUS
KABI**

caring for life



Ny dør

Ny dør med vertikale sideskinner forbedrer fiksering av ernæringssettet bak døren

Applix ernæringssett har samtidig fått modifisert klemme for enda bedre fiksering. Applix sett med og uten ny klemme kan brukes om hverandre

Ny software

Applix Smart kommer nå med oppdatert software, Versjon 5.1

Identifisering av Applix Smart pumper med ny software:

- Versjon 5.1 fremkommer i displayet ved å trykke på **I** knappen under selvtesten ved oppstart
- Tredje tallet i e-coden vil være 4 (E-code:xx4x)

Applix Control for software versjon 5.1 vil være tilgjengelig i løpet av juni 2008

Se baksiden for detaljer om V5.1



**FRESENIUS
KABI**

Applix Smart V 5.1

EGENSKAP	BESKRIVELSE	FORDEL
Fremvisning av gjenstående volum <i>Ny funksjon</i>	Man kan velge mellom å få fremvist innstilt eller gjenstående volum i displayet under drift. Fabrikkinstillingen viser innstilt målvolum. Dette kan endres til nedtelling av gjenstående volum ved å: 1. trykke på nøkkelsymbolet 2. innstille koden 26 med øverste pilsett 3. innstille ON med nederste pilsett 4. trykke på nøkkelsymbol igjen Gjenta samme prosedyre og innstill OFF for å gå tilbake fremvisning av målvolum i displayet under drift.	Lettere å følge med på gjenværende volum
Sparing av minne om gjenstående volum <i>Endret funksjon</i>	Informasjon om gjenværende volum (når målvolum er valgt) vil bli lagret selv om: - pumpen stoppes og hastighet justeres - pumpen slås av og startes på nytt	Pumpen begynner ikke å telle på nytt selv om pumpen slås av
Informasjon om siste alarm <i>Ny funksjon</i>	Ved å trykke på i knappen når pumpen er stoppet, vil ikonene for den siste alarmen fremkomme etter informasjonen gitt volum og innstilt/gjenværende volum	Mulig å hente frem informasjon om siste alarm etter at den er korrigeret Gir mulighet for en mer målbevisst problemløsning
Alarmpause <i>Ny funksjon</i>	Ved å trykke på bjellesymbolet vil den akustiske alarmen ta pause i 2 minutter. Ikonet for den gjeldende alarmen vil hele tiden blinke i displayet. Etter 2 minutter vil den akustiske alarmen fortsette frem til korrigerende tiltak utføres og alarmen slås av med START/STOP knappen.	Gir pasient og pleiepersonale tid til å observere informasjonen om utløst alarm som fremkommer i displayet uten å bli forstyrret av den akustiske alarmen.
Forsinkelse i STOP knapp <i>Ny funksjon</i>	Det er lagt inn en forsinkelse i STOP knappen for å unngå at man starter pumpen igjen for raskt.	Unngår utilsiktet start av pumpen igjen ved å trykke to ganger på START/STOP knappen uten å være klar over det.
Luftsensor algoritme <i>Forbedret funksjon</i>	Optimalisert algoritme for å innslag av luftsensoralarm.	Minimalisering av falske luftalarmer knyttet til sensor kalibrering
Kalibrerings informasjon <i>Ny funksjon</i>	Mulig å lese av kalibreringsinformasjonen fra fabrikk for å sammenligne med gjeldende verdi.	Bedre sensor ekspertise. Observere potensielle sensor avvik.
Alarm historie <i>Forbedret funksjon</i>	Økning av informasjon om siste antall alarmer fra 16 til 32	Muliggjør tilgang til mer historisk informasjon

