

## APPLIX Smart V5.1i og 5.1j

Prosedyre for å aktivere AIR OFF ved SW Version 5.1i og 5.1j:

1. Endre: **C:\Program Files\Fresenius Vial\Applix\_Control\_Version\_6\_1\_6\applixctrl.ini** til [Parametres] record ShowAirOnOff=1191 (istedet for 0)
2. Koble pumpe til ved hjelp av applix control 6.1.6, gå til "**parameters menu**" og tast inn kode **120309979** i Air sensor Activate/Deactivate seksjon
3. Trykk på "generate"
4. Velg luftsensor OFF og trykk på apply
5. Pumpen står nå i AIR OFF mode

Trenger du hjelp eller veiledning?

Ta kontakt med Fresenius-Kabi Norge AS, 22 58 80 00

